

Gebrauchsanweisung Mode d'emploi

1

Reinschlüpfen

Ziehen Sie den AquaSkin[®] über den Arm, bis die betroffene Stelle vollkommen geschützt ist. Die Öffnungen sollen auf beiden Seiten glatt an der Haut anliegen. Ist der AquaSkin[®] zu eng, können Sie an der Öffnung bis zu 5mm abschneiden und ihn erneut anprobieren. Schneiden Sie nicht zu viel ab, denn ein enges Anliegen ist nötig, damit ein Vakuum entsteht.

Vorsicht: scharfe Objekte, Fingernägel oder Schmuck können die AquaSkin[®] Hülle verletzen.

Enfilez

Enfilez la protection par-dessus la zone à protéger, de manière à la couvrir complètement. Des deux côté, l'ouverture doit s'ajuster impeccablement à la peau et serrer. Si le joint d'étanchéité serre trop fort, découpez prudemment quelques millimètres de l'ouverture pour l'agrandir légèrement. Veillez à ne pas découper trop, faute de quoi vous ne parviendrez plus à obtenir un vide d'air dans le manchon.

Attention : des objets tranchants, les ongles ou les bijoux peuvent abîmer la protection.

2

Luft entziehen

Befestigen Sie das lange Ende der Pumpe am Ventil des AquaSkin[®]. Pumpen Sie solange bis die Schutzhülle flach am Körper anliegt. Entfernen Sie die Pumpe und schliessen Sie die Sicherheitsabdeckung am Ventil. Bevor Sie ins Wasser gehen, versichern Sie sich, dass der AquaSkin[®] dicht und mit straffen Falten an der Haut haftet (Vakuum). Bitte ca. 5 Minuten beobachten.

Rendre étanche

Pressez la pompe afin d'obtenir le vide d'air et que la protection adhère parfaitement au membre. Retirez la pompe et refermez le clapet de sécurité. Avant d'aller dans l'eau assurez-vous de l'étanchéité et que la protection présente une structure ridée (svp patientez 5 min).

3

Ausziehen

Führen Sie zwei Finger zwischen Haut und Schutzhülle, so dass wieder Luft eindringt. Der AquaSkin[®] kann nun mühelos ausgezogen werden. Reinigen Sie die Schutzhülle mit Wasser und Seife.

Retirer

Introduisez un doigt entre la peau et la protection jusqu'à ce que l'air pénètre dans l'AquaSkin[®]. Vous pourrez ensuite la retirer. Nettoyez éventuellement avec de l'eau et du savon

Bitte beachten:

- Wir empfehlen eine maximale Tragedauer von 45 Minuten.
- Halten Sie sich in nassen oder rutschigen Umgebungen fest.
- Befolgen Sie in jedem Fall die Anweisungen Ihres Arztes.

Attention :

- Nous préconisons une durée d'utilisation de 45 minutes au maximum.
- Soyez prudent et tenez-vous dans les endroits mouillés et glissants.
- Veuillez observer en toutes circonstances les recommandations de votre médecin.

Hilfreiche Tipps für den Umgang mit AquaSkin[®]-Schutzüberzügen:

- Bei der Größenbestimmung ist die Ermittlung des richtigen Umfangs (Bizeps und Unterarm) besonders wichtig. Dieses Mass trägt zur zuverlässigen Vakuumabdichtung bei.

Conseils utiles pour les protections AquaSkin[®] :

- Lors du choix de la taille, la mesure de la circonférence du biceps et de l'avant-bras est essentielle. Ce sont ces mesures qui garantiront l'étanchéité.

www.aquaskin.ch :

Online Assistenz - Videos und Beratung
Assistance en ligne - Vidéos et conseils